

鼻腔和咽喉合併拭子 樣本採集指引 ▼

檢查套裝配件

樣本收集瓶 x1
(內有採樣液)

樣本收集袋 x1
測試表格 x1

醫療化驗袋 x1
酒精消毒棉 x1

拭子棒 x2

樣本收集說明書 x1



用梘液或酒精搓手液清潔雙手,打開樣本收集包,取出並打開樣本收集瓶,然後從無菌包裝中取出**拭子棒**。



頭稍微向後傾大約70度,將拭子棒以與鼻樑平衡的方向輕輕伸入鼻孔約1至2cm或直至感到阻力,輕輕旋轉拭子棒大概**10至15秒**,取出拭子棒時亦需同時慢慢旋轉。



以**同一拭子棒**於另一個鼻孔採集樣本。



將拭子棒頭浸入樣本收集瓶內的採樣液中,穩握樣本收集瓶,折斷拭子棒尾部。



把樣本收集瓶放進樣本袋裡封好,同時確保樣本袋上沒有任何滲漏,再和已填妥的測試表格一同放進醫療化驗袋中。最後把樣品保持冷藏及儘快把樣本交回。



用酒精消毒棉把樣本收集瓶身消毒清潔好,然後在瓶身寫上名字和身份證號碼。



將拭子棒頭浸入**同一個**樣本收集瓶內採樣液中,穩握樣本收集瓶,折斷拭子棒尾部,大力扭緊瓶蓋,確保採樣液不會滲漏。



發出「呀」的一聲,在扁桃腺位置上下左右擦拭各**3至5次**,避免觸碰到舌頭,牙齒及牙齦。



取出**第二支拭子棒**,張口把拭子棒伸入咽喉壁。