

鼻咽拭子 樣本採集指引 ▼

檢查套裝配件

樣本收集瓶 x1
(內有採樣液)

樣本收集袋 x1

醫療化驗袋 x1

鼻咽拭子棒(幼) x1

樣本收集說明書 x1

酒精消毒棉 x1

測試表格 x1



用視液或酒精搓手液清潔雙手,打開樣本收集包,取出並打開樣本收集瓶,然後從無菌包裝中取出**鼻腔拭子棒(幼)**。



頭稍微向後傾大約70度,將**鼻腔拭子棒(幼)**以與鼻樑平衡的方向輕輕伸入鼻孔約1至2cm或直至感到阻力,輕輕旋轉拭子棒大概**10至15秒**,取出拭子棒時亦需同時慢慢旋轉。



以**同一拭子棒**於另一個鼻孔採樣樣本。



將拭子棒頭浸入樣本收集瓶內的採樣液中,穩握樣本收集瓶,折斷拭子棒尾部,**大力扭緊瓶蓋,確保採樣液不會滲漏。**



採集鼻咽拭子樣本應由院舍或診所內受過訓練的人員負責

把樣本收集瓶放進樣本袋裡封好,同時確保樣本袋上沒有任何滲漏,再和已填妥的測試表格一同放進醫療化驗袋中。最後把樣品保持冷藏及儘快把樣本交回。



用酒精消毒棉把樣本收集瓶身消毒清潔好,然後在瓶身寫上名字和身份證號碼。